

Click'aV® Kleszczyki do usuwania klipsów
Instrukcja używania

Nr ref:

Do chirurgii otwartej: 0301-R804MMLL, 0301-R804XL

Do chirurgii endoskopowej, nierozbieralne:

5 mm: 0301-R804MLLE, 0301-R804MLLEB

10 mm: 0301-R804LXLE, 0301-R804LXLEB

Do chirurgii endoskopowej, rozbieralne:

Wkład:

5 mm: 0301-R804MLLEI, 0301-R804MLLEIB

10 mm: 0301-R804LXLEI, 0301-R804LXLEIB

Rękojeść z trzonem:

5 mm: 0301-R804MLLEHS, 0301-R804MLLEHSB

10 mm: 0301-R804LXLEHS, 0301-R804LXLEHSB

 Grena Ltd, 1000 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9HH, Zjednoczone Królestwo	Dane kontaktowe: Telefon/Fax: + 44 115 9704 800	 DUBLIN, Irlandia D6W PP38	MDML INTL LTD. Unit 7, Argus House Greenmount Office Park, Harold's Cross Road Dublin 6W,	 0197	POL IFU-R45-POL_15
---	--	--	---	---	------------------------------



Ważne:

Niniejsza instrukcja nie może służyć jako podręcznik technik chirurgicznych stosowanych podczas pracy z kleszczykami do usuwania klipsów Click'aV®. Dla uzyskania wskazówek dotyczących techniki chirurgicznej należy zwrócić się do naszej firmy bądź autoryzowanego przedstawiciela handlowego oraz zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami technicznymi i fachową literaturą medyczną oraz przejść stosowne szkolenie pod okiem chirurga doświadczanego w technikach chirurgii małoinwazyjnej. Przed przystąpieniem do pracy zalecamy uważne przeczytanie wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Niedopełnienie powyższego może prowadzić do poważnych konsekwencji chirurgicznych takich jak uraz pacjenta, zanieczyszczenie, infekcja, infekcja krzyżowa lub zgon.

Wskazania:

Kleszczyki do usuwania klipsów polimerowych Grena Click'aV® są przeznaczone do bezpiecznego otwierania i usuwania polimerowych klipsów Grena Click'aV® i Click'aV Plus™ z tkanki, gdy konieczne jest ich usunięcie. Ze względu na bezpieczny mechanizm zatraskowy klipsów naczyniowych Click'aV®, są one bardzo odporne na otwieranie za pomocą standardowych narzędzi chirurgicznych. W związku z tym zdecydowanie zaleca się, aby podczas każdego zabiegu z użyciem klipsów naczyniowych Click'aV® lub Click'aV Plus™ dostępne były kleszczyki do ich usuwania.

Grupa docelowych pacjentów - dorośli i młodzi pacjenci, mężczyźni i kobiety.

Przewidziani użytkownicy: wyrób przeznaczony jest do użycia wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia.

Przeciwwskazania:

Dla urzędzenia nie są znane żadne przeciwwskazania.

Opis wyrobu:

Kleszczyki do usuwania polimerowych klipsów naczyniowych Click'aV® są narzędziami chirurgicznymi wielokrotnego użytku, dostępnymi w wersjach do chirurgii otwartej, jak również endoskopowej. Każdy rozmiar klipsa musi być usuwany przy użyciu odpowiednich i kompatybilnych kleszczyków do usuwania klipsów.

Kleszczyki endoskopowe w rozmiarze MML mogą przechodzić przez kaniulę trokara 5 mm, podczas gdy kleszczyki w rozmiarze LXL wymagają kaniuli trokara 10 mm.

Kleszczyki endoskopowe nierozbieralne mają wbudowany kanał płuczący i nie wymagają demontażu w celu czyszczenia. Natomiast wersja rozbieralna wymaga demontażu w celu czyszczenia poprzez odkręcenie wkładu od trzonu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Kanał płuczący w wersji rozbieralnej ułatwia usuwanie zanieczyszczeń z trzonu po wyjęciu wkładu. Trzon endoskopowych kleszczyków można obracać o 360° względem rękojeści.

Wkłady MML są kompatybilne z rękojeściami 5 mm, podczas gdy wkłady LXL są przeznaczone do rękojeści 10 mm.

Wersje bariatryczne są oznaczone literą "B" w numerze referencyjnym.

Instrukcja używania:

- Potwierdź kompatybilność wszystkich urządzeń przed użyciem.
- Wybierz odpowiedni typ i rozmiar kleszczyków do usuwania klipsów kompatybilny z klipsem, który ma zostać otwarty. W przypadku posługiwania się rozbieralnymi kleszczykami endoskopowymi wybierz wkład i rękojeść odpowiadające rozmiarowi klipsa. Włóż go do trzonu rękojeści i wkręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu wycucia oporu.
- Chwyć kleszczyki do zabiegów otwartych za rękojeść tak, jak standardowe narzędzia tego typu i umieść szczęki kleszczyków w pobliżu klipsa, który ma zostać otwarty. W przypadku endoskopowych kleszczyków do usuwania należy ścisnąć rękojeść podczas wprowadzania szczęk i trzonu narzędzia przez kaniulę. Utrzymuj uścisk, aż szczęki całkowicie opuszczą kaniulę. Ten krok jest niezbędny, ponieważ średnica wewnętrzna większości kaniuli jest mniejsza niż zewnętrzna szerokość otwartych szczęk kleszczyków. Ściskanie rękojeści kleszczyków może być również konieczne podczas wyjmowania instrumentu z kaniuli.
- Należy uzyskać dostęp do klipsa od strony zawiąsu, nie od strony zatrasku.**
- Zbliż narzędzie do klipsa na tkance i obróć kleszczyki tak, aby szczęki znajdowały się bezpośrednio ponad i w linii ramion klipsa.
- Przesuń kleszczyki do momentu, gdy zawiase klipsa znajdzie się w tylnej części szczęk kleszczyków. Upewnienie się, że zawiase jest prawidłowo umieszczony z tyłu szczęk ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego odłączenia ramion klipsa.
- Delikatnie zamknij kleszczyki na klipsie i upewnij się, że pomiędzy klipsem a szczękami narzędzia nie została uchwycona żadna tkanka. Każde z ramion klipsa powinno przylegać do odpowiedniej szczęki kleszczyków. Użyj stosownej siły, aby zamknąć narzędzie całkowicie, do momentu wycucia delikatnego kliknięcia, wskazującego, że ramiona klipsa zostały pomyślnie odłączone.
- Otwórz rękojeści kleszczyków, aby zwolnić klips. Potwierdź wizualnie, że klips otworzył się całkowicie, i że ząb klipsa wolny jest od jakiegokolwiek tkanki.
- Kleszczyki mogą zostać wykorzystane jako chwytak otwartego klipsa. Chwyć klips i wycofaj go z pola operacyjnego, utrzymując pewny uchwyt. W przypadku procedury endoskopowej klips musi zostać uchwycony za zawiase, aby pozwolić na prawidłowe wycofanie klipsa poprzez trokar.

Kompatybilność:

Rozmiar klipsa Click'aV®, Click'aV Plus™	Kompatybilne kleszczyki endoskopowe Click'aV®	Kompatybilne kleszczyki Click'aV® do chirurgii otwartej
M	0301-R804MLLE, 0301-R804MLLEB, 0301-R804MLLEI, 0301-R804MLLEIB, 0301-R804MLLEHS, 0301-R804MLLEHSB	0301-R804MMLL
ML	0301-R804MLLE, 0301-R804MLLEB, 0301-R804MLLEI, 0301-R804MLLEIB, 0301-R804MLLEHS, 0301-R804MLLEHSB	
L	0301-R804MLLE, 0301-R804MLLEB, 0301-R804MLLEI, 0301-R804MLLEIB, 0301-R804MLLEHS, 0301-R804MLLEHSB, 0301-R804LXLE, 0301-R804LXLEB, 0301-R804LXLEI, 0301-R804LXLEIB, 0301-R804LXLEHS, 0301-R804LXLEHSB – szczególnie zalecane	
XL	0301-R804LXLE, 0301-R804LXLEB, 0301-R804LXLEI, 0301-R804LXLEIB, 0301-R804LXLEHS, 0301-R804LXLEHSB	0301-R804XL

Wszystkie kleszczyki do usuwania klipsów polimerowych są również kompatybilne z klipsami polimerowymi innych producentów, które mają ten sam typ i rozmiar mechanizmu zatraskowego, pod warunkiem, że rozmiar klipsa odpowiada rozmiarowi kleszczyków. Aby uzyskać optymalną wydajność, zdecydowanie zaleca się stosowanie kleszczyków firmy Grena zaprojektowanych specjalnie do klipsów naczyniowych Click'aV® i Click'aV Plus™.



Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Po każdym użyciu i przed nim należy dokładnie sprawdzić urządzenie pod kątem oznak uszkodzenia. Nie należy używać uszkodzonych kleszczyków, ponieważ może to spowodować niemożność otwarcia klipsa lub uszkodzenie tkanki. Po zamknięciu szczęki powinny być bezpośrednio wyrównane, a nie przesunięte. Przed użyciem należy zawsze sprawdzić wyrównanie szczęk kleszczyków. Niewspółosiowość szczęk może spowodować pęknięcie klipsa podczas zamykania, pozostawiając połamane kawałki klipsa w jamie ciała i potencjalnie prowadząc do obrażeń pacjenta.
- Wszystkie zabiegi chirurgiczne oraz małoinwazyjne powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie oraz znajomość odpowiednich technik. Zapoznaj się ze stosowną literaturą dotyczącą technik, powikłań oraz zagrożeń przed przystąpieniem do wykonywania jakiegokolwiek procedury chirurgicznej.
- Narzędzia chirurgiczne mogą różnić się w zależności od producenta. Gdy do zabiegu używane są przyrządy oraz akcesoria różnych producentów, sprawdź ich kompatybilność przed rozpoczęciem operacji. Niewykonywanie tej czynności może skutkować wydłużeniem czasu zabiegu, niemożnością jego przeprowadzenia lub koniecznością konwersji do zabiegu otwartego.
- Kleszczyki do usuwania klipsów polimerowych Click'aV® są kompatybilne tylko z klipsami Click'aV® i Click'aV Plus™ i nie są kompatybilne z klipsami Vclip® lub LigaV®. Przed rozpoczęciem procedury zawsze upewnij się, że wybrany został odpowiedni typ kleszczyków Grena. Niewykonywanie tej czynności może doprowadzić do niemożności przeprowadzenia zabiegu.
- Nie używaj kleszczyków jako narzędzia do rozcinania lub ogólnego chwytania, z wyjątkiem ekstrakcji otwartego klipsa, ponieważ nie jest on przeznaczony do takich procedur i będzie nieskuteczny.
- Nie zaciskaj kleszczyków wokół innych narzędzi chirurgicznych, jako że może to uszkodzić zarówno kleszczyki, jak i narzędzie.
- Po usunięciu klipsa należy koniecznie sprawdzić miejsce podwiązania, aby upewnić się, że nie doszło do żadnych klinicznie istotnych uszkodzeń tkanki. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń należy zastosować odpowiednią technikę naprawy.
- Przed zakończeniem zabiegu należy zawsze sprawdzić miejsce zabiegu pod kątem hemostazy. Krwawienie należy opanować za pomocą odpowiednich metod chirurgicznych.
- Otwarty klips powinien być zawsze wyrzucony i nie może zostać wykorzystany powtórnie, nawet, jeśli nie obserwuje się widocznych uszkodzeń. Klips otwarty za pomocą kleszczyków może ulec mikropęknięciom, co może spowodować jego pęknięcie lub ześlizgnięcie się z naczynia, prowadząc do krwotoku.
- Jeśli konieczna jest utylizacja produktu, należy to zrobić zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi, w tym między innymi dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska.
- Zachowaj ostrożność w przypadku możliwości narażenia na kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi. Przestrzegaj procedur szpitalnych dotyczących stosowania odzieży i sprzętu ochronnego.

Gwarancja na kleszczyki do usuwania klipsów polimerowych:

Wszystkie kleszczyki do usuwania klipsów polimerowych Click'aV®, Click'aV Plus™ objęte są jednoroczną gwarancją. Grena naprawi nieodpłatnie każde kleszczyki pod warunkiem użytkowania ich w typowych procedurach chirurgicznych we współpracy z klipsami Grena, dla których zostały one zaprojektowane, jeśli nie były one naprawiane przez osoby nieuprawnione. Gwarancja nie obejmuje przypadków uszkodzeń powstałych w efekcie stosowania klipsów innych niż produkowane przez firmę Grena.

Instrukcja reprocosowania:

Poniższe sekcje przedstawiają postępowanie wymagane do ponownego przygotowania do użycia kleszczyków do usuwania klipsów naczyniowych Grena Click'aV® i Click'aV Plus™. Obejmują one obróbkę wstępną w miejscu użycia, ręczne czyszczenie i dezynfekcję, automatyczne czyszczenie i dezynfekcję, a także sterylizację parową w procesie z próżnią frakcjonowaną.

OSTRZEŻENIA	UWAGA: Kanał płuczący jest długi i wąski. Podczas czyszczenia należy dołożyć szczególnych starań, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Nie używać detergentów żelujących. UWAGA: Użytkownik / osoba reprocosująca powinni przestrzegać lokalnego prawa i zaleceń w krajach, w których wymagania odnośnie reprocosowania są ostrzejsze niż wyszczególnione w niniejszej instrukcji. Ponadto należy przestrzegać szpitalnych przepisów dotyczących higieny oraz zaleceń odpowiednich profesjonalnych stowarzyszeń. UWAGA: Przed kolejnym użyciem narzędzie należy poddać dokładnemu reprocosowaniu zgodnie z niniejszą instrukcją. UWAGA: Cały personel szpitalny mający styczność lub pracujący z zanieczyszczonymi, lub potencjalnie zanieczyszczonymi wyrobami medycznymi powinien przestrzegać ogólnych środków ostrożności. Należy zachować ostrożność podczas styczności z narzędziami posiadającymi ostrza lub krawędzie tnące. UWAGA: Podczas styczności lub pracy z zanieczyszczonymi, lub potencjalnie zanieczyszczonymi materiałami należy stosować środki ochrony osobistej. Należą do nich fartuchy, maski, okulary, osłony na twarz, rękawice i ochraniacze na obuwie. Przestrzegaj ogólnych przepisów dotyczących obchodzenia się z zanieczyszczonymi przedmiotami oraz poniższych środków ostrożności: - Podczas dotykania narzędzi używaj rękawic ochronnych. - Odizoluj zanieczyszczony materiał przez zastosowanie odpowiedniego opakowania i oznakowania. UWAGA: Nie kładź ciężkich narzędzi na delikatnych wyrobach. Do czyszczenia ręcznego nie należy używać metalowych szczotek oraz zmywaków. Takie materiały niszczą powierzchnię i wykończenie narzędzia. Należy używać szczotek o miękkim nylonowym włosiu i czyścików do drenów. UWAGA: Nie pozwól, aby zanieczyszczone wyroby wyschły przed reprocosowaniem. Wszystkie następne etapy mycia i sterylizacji będą łatwiejsze jeśli na użytych wyrobach nie zaschnie krew, płyny ustrojowe, pozostałości kości i tkanek, soli fizjologicznej lub środki dezynfekcyjne. Używane narzędzia należy przekazać do centralnej sterylizacji w zamykanych pojemnikach, aby zapobiec niepotrzebnemu zanieczyszczeniu. UWAGA: Po zakończeniu zabiegu wszystkie części narzędzia mające kontakt z pacjentem należy oczyścić i zdezynfekować. UWAGA: Należy stosować wyłącznie środki czyszczące/dezynfekujące dopuszczone do reprocosowania wyrobów medycznych. Należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczących stosowania środków czyszczących/dezynfekujących. Stosowanie nieodpowiednich roztworów do czyszczenia lub dezynfekcji oraz stosowanie nieodpowiednich procedur czyszczenia lub dezynfekcji może mieć negatywne konsekwencje dla narzędzi, takie jak : - Uszkodzenie lub korozja; - Odbarwienie produktu; - Korozja części metalowych; - Skrócona żywotność; - Wygaśnięcie gwarancji. UWAGA: Grena Ltd. zaleca używanie wyłącznie myjki-dezynfektorów zgodnych z normą EN ISO 15883-1 i -2 do automatycznego czyszczenia/dezynfekcji. Zaleca się, aby w miarę możliwości reprocosowanie mechaniczne miało pierwszeństwo przed ręcznymi metodami reprocosowania.
Ograniczenia reprocosowania:	Narzędzie jest dostarczane jako niesterylne i musi zostać umyte i wysterylizowane przed każdym użyciem. W przypadku kleszczyków endoskopowych mycie wstępne należy przeprowadzić z wykorzystaniem myjki ultradźwiękowej, co pozwoli usunąć środek konserwujący z narzędzia. Zalecane parametry to 3 min, 40 C, 35 kHz. Intensywne użytkowanie lub wielokrotne reprocosowanie wywiera znaczący wpływ na narzędzie. Czas życia wyrobu jest determinowany oznakami zużycia i uszkodzeń wynikających z użytkowania. Nie należy używać uszkodzonych lub skorodowanych narzędzi. Należy unikać stosowania twardej wody. Do wstępnego płukania można użyć zmiękzonej wody z kranu. Do końcowego płukania należy użyć wody oczyszczonej, aby zapobiec wytrącaniu osadów mineralnych na narzędziu. Wodę można oczyścić, stosując jedną lub więcej z następujących metod: ultrafiltracja, odwrócona osmoza, dejonizacja lub inne, równorzędne metody.
INSTRUKCJE	
W miejscu użycia:	Wstępne czyszczenie urządzeń należy przeprowadzić natychmiast po zabiegu, z zastosowaniem środków ochrony osobistej. Celem jest zapobieganie wysychaniu materiału organicznego i pozostałości chemicznych wewnątrz lub na zewnętrznych częściach narzędzi, oraz zapobieganie zanieczyszczeniu otaczających powierzchni. - Usunąć większe zanieczyszczenia, płyny ustrojowe i tkanki jednorazową ściereczką materiałową lub papierową. - Natychmiast po użyciu zanurzyć narzędzie w wodzie (o temperaturze poniżej 40°C). - Nie stosuj detergentów żelujących, ani wody o temp. powyżej 40°C, ponieważ mogą one powodować przywieranie zanieczyszczeń i wpłynąć na dalsze etapy reprocosowania.
Przechowywanie i transport:	Zaleca się reprocosowanie narzędzi najszybciej jak to jest praktycznie możliwe po użyciu. Dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń, narzędzia należy zabezpieczyć w zamkniętym pojemniku na czas przechowywania i transportu do miejsca dalszego reprocosowania. Maksymalny czas między wyjęciem narzędzia z roztworu dezynfekującego a dalszymi etapami czyszczenia nie może przekroczyć 1 godziny. Należy przetransportować narzędzia do pomieszczenia w którym będzie reprocosowane i umieścić je w misce z roztworem czyszczącym.
Przygotowanie do mycia:	Demontaż jest wymagany jedynie w odniesieniu do narzędzi rozbiernych. Można je zidentyfikować po literach HS, będących częścią numeru katalogowego nadrukowanego na rękojeści. Aby rozłożyć narzędzie chwycić dwoma palcami dystalną część trzonu i obracać pokręto na trzonie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aby wykręcić wkład. Wyjmij wkład z trzonu. Dla złożenia postępuj w odwrotnej kolejności. Nie trzymaj narzędzia za szczęki do jego rozłożenia / złożenia, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na współbieżność szczęk. Środki czyszczące należy przygotować w stężeniach użytkowych i temperaturach zalecanych przez producenta. Do przygotowania środków czyszczących może być użyta zmiękczona woda z kranu. Przestrzeganie zalecanych temperatur jest ważne dla optymalnego działania środków czyszczących. UWAGA: Należy sporządzić świeże roztwory kiedy dotychczasowe stały się mocno zanieczyszczone (krwiste i/lub mętne).
Czyszczenie/Dezynfekcja: Ręczne	Sprzęt: neutralny lub zasadowy enzymatyczny detergent proteolityczny, miękka szczotka Steris 1B33B3 lub podobna, myjka ciśnieniowa pistoletowa lub strzykawka o dużej objętości, ultradźwiękowa łaźnia wodna. Zwalidowana procedura czyszczenia wstępnego: - Zanurzyć narzędzie w roztworze do mycia/dezynfekcji przez 5 min (do walidacji użyto 4% Sekusept Activ, 30-35°C). - Używając szczoteczki z miękkim włosiem i trzymając urządzenie wewnątrz roztworu do namaczania, nanieść roztwór myjący/dezynfekujący na wszystkie powierzchnie, upewniając się, że szczęki są czyszczone zarówno w pozycji otwartej, jak i zamkniętej. Upewnij się, że wszystkie widoczne zanieczyszczenia zostały usunięte. Przepłucz wnętrze trzonu roztworem. - Oplucz narzędzie pod wodą z kranu (< 40°C) jednocześnie uruchamiając urządzenie, aż na urządzeniu lub w strumieniu płuczącym nie będzie śladów krwi lub zabrudzeń, ale nie krócej niż przez 3 minuty. - Użyj strzykawki o dużej objętości (lub ciśnieniowego pistoletu czyszczącego) do agresywnego przepłukania wnętrza trzonu wodą z kranu (<40°C) przez port płukania na proksymalnym końcu trzonu, aż do momentu, gdy żaden widoczny brud nie opuści trzonu, ale przynajmniej przez 1 minutę Zwalidowana procedura czyszczenia ręcznego: - Umieść urządzenie w ultradźwiękowej łaźni wodnej wypełnionej roztworem myjącym/dezynfekującym i sonifikuj przez 3 minuty, 40±1°C, 35 kHz (do walidacji użyto 2% Sekusept Activ). - Wyjmij urządzenie z ultradźwiękowej łaźni wodnej. - Za pomocą szczotki z miękkim włosiem szorować urządzenie pod bieżącą wodą o temperaturze poniżej 40°C przez co najmniej 1 minutę lub do momentu usunięcia wszystkich widocznych pozostałości. - Za pomocą ciśnieniowego pistoletu czyszczącego lub strzykawki o dużej objętości agresywnie przepłukać wnętrze trzonu wodą z kranu (o temperaturze poniżej 40°C) do momentu, aż z trzonu nie będą wydostawać się widoczne zabrudzenia, jednak nie krócej niż przez 1 minutę. - Przepłukać urządzenie pod czystą bieżącą wodą, w tym kanał płuczący, jednocześnie uruchamiając urządzenie. Na tym etapie należy użyć wody UF, RO lub DI. - Usunąć nadmiar wilgoci z urządzenia za pomocą czystej, chłonnej i niestrzępiącej się ściereczki. - Osuszyć urządzenie sprężonym powietrzem medycznym, w tym kanał płuczący. UWAGA: Należy pamiętać, że wszystkie procesy czyszczenia i dezynfekcji powinny zostać zwalidowane. Sprawdź wizualnie czystość, aby upewnić się, że wszystkie zanieczyszczenia zostały usunięte. Jeśli urządzenie nie jest wizualnie czyste, powtórz czynności reprocosowania, do momentu aż urządzenie będzie wizualnie czyste. UWAGA: Zaleca się, aby szczotki użyte do mycia narzędzi zostały wyczyszczone po każdym użyciu (jeśli to możliwe w ultradźwiękowej łaźni wodnej) a następnie zdezynfekowane. Po umyciu i dezynfekcji muszą być przechowywane w suchym miejscu i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.
Czyszczenie / Dezynfekcja: Automatyczne	Wyposażenie — Myjka/dezynfektor, neutralny lub alkaliczny enzymatyczny detergent proteolityczny, szczotka z miękkim włosiem Steris 1B33B3 lub podobna, pistolet ciśnieniowy do czyszczenia lub strzykawka o dużej objętości, ultradźwiękowa łaźnia wodna Instrumenty endoskopowe mają kanały, szczeliny i wąskie połączenia. Zaschnięte zabrudzenia są bardzo trudne do usunięcia z takich miejsc za pomocą automatycznego czyszczenia. Aby osiągnąć skuteczne czyszczenie, konieczne jest usunięcie dużych zanieczyszczeń przed automatycznym reprocosowaniem, dlatego Grena Ltd. zaleca ręczne czyszczenie wstępne. W szczególności przed czyszczeniem w myjni/dezynfektorze należy wstępnie wyczyścić trzon narzędzia. Zwalidowana procedura mycia wstępnego: - Zanurzyć urządzenie w roztworze myjącym/dezynfekującym przez 5 minut (do walidacji użyto 4% Sekusept Activ, 30-35°C). - Używając szczoteczki z miękkim włosiem i trzymając urządzenie wewnątrz roztworu do namaczania, nanieść roztwór myjący/dezynfekujący na wszystkie powierzchnie, upewniając się, że szczęki są czyszczone zarówno w pozycji otwartej, jak i zamkniętej. Upewnij się, że wszystkie widoczne zanieczyszczenia zostały usunięte. Przepłukać wnętrze trzonu roztworem.

*Papierowe kopie instrukcji użytkowania dostarczane z produktami Grena są zawsze w języku angielskim.
Jeśli potrzebują Państwo papierowej kopii IFU w innym języku, prosimy o kontakt z
Grena Ltd. ifu@grena.co.uk lub pod numerem + 44 115 9704 800.*

*Prosimy o zeskanowanie poniższego kodu QR za pomocą odpowiedniej aplikacji.
Przekieruje to Państwa do strony internetowej Grena Ltd., na której można wybrać eIFU w preferowanym języku.*

Mogą Państwo wejść na stronę bezpośrednio, wpisując w przeglądarce www.grena.co.uk/IFU.

*Przed użyciem urządzenia prosimy upewnić się, że papierowa wersja IFU w Państwa posiadaniu jest w najnowszej wersji.
Prosimy zawsze stosować IFU w najnowszej wersji.*

