

20. Aruncați toate cartușele de clipuri deschise, indiferent dacă toate clipurile au fost folosite sau nu, deoarece sterilitatea și funcționalitatea completă a dispozitivului nu pot fi garantate dacă clipurile sunt folosite la scurt timp după deschiderea ambalajului.
21. Materialul implantat aparține grupului de polietilene. Materialul utilizat nu necesită restricții cantitative în ceea ce privește clipurile aplicate pacientului.
22. Se utilizează imediat după deschidere.
23. Aveți grijă să aruncați produsul și ambalajul după utilizare, precum și dispozitivele nefolosite, dar deschise, în conformitate cu practicile de eliminare a deșeurilor spitalicești și cu reglementările locale, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cele referitoare la sănătatea și siguranța umană și la mediu.
24. Acest produs este destinat utilizării pentru un singur pacient și pentru o singură procedură. Resterilizarea, reutilizarea, reprelucrarea, modificarea pot duce la consecințe grave, inclusiv la decesul pacientului.
25. În cazul în care a avut loc un incident grav în legătură cu dispozitivul, acesta trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.



Păstrați uscat



eIFU indicator
www.grena.co.uk/IFU

Consultați
instrucțiunile electronice
de utilizare



Producător



Nu reutilizați



Atenție



Nu se reesterilizează



Nu utilizați dacă ambalajul este
deteriorat și consultați instrucțiunile
de utilizare



Data limită de consum



Reprezentant autorizat în
Comunitatea Europeană



Număr de catalog



Codul lotului



Cantitate în pachet



Sterilizat cu ajutorul oxidului de
etilenă



MR sigur



Data de fabricație



Steril unic
sistem de barieră



Dispozitiv medical

*Exemplele pe suport de hârtie ale instrucțiunilor de utilizare livrate împreună cu produsele Grena sunt întotdeauna în limba engleză.
Dacă aveți nevoie de o copie tipărită a IFU în altă limbă, puteți contacta Grena Ltd.
la ifu@grena.co.uk sau la + 44 115 9704 800.*

*Vă rugăm să scanați codul QR de mai jos cu aplicația corespunzătoare.
Acesta vă va conecta cu site-ul web al Grena Ltd. unde puteți alege eIFU în limba preferată.*

Puteți intra direct pe site-ul web tastând www.grena.co.uk/IFU în browserul dumneavoastră.

*Asigurați-vă că versiunea pe suport de hârtie a IFU pe care o dețineți este cea mai recentă versiune înainte de a utiliza dispozitivul.
Utilizați întotdeauna IFU în cea mai recentă versiune.*

