

Click'aV® Removedor de clips de ligadura
Instruções de utilização

N.º de ref.: 0301-R804MMLL, 0301-R804XL, 0301-R804MLLE, 0301-R804LXLE, 0301-R804MLLEB, 0301-R804LXLEB, 0301-R804MLLEI, 0301-R804LXLEI, 0301-R804MLLEIB, 0301-R804LXLEIB, 0301-R804MLLEHS, 0301-R804LXLEHS, 0301-R804MLLEHSB, 0301-R804LXLEHSB

 <p>Grena Ltd, 1000 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9HH, Reino Unido</p>	<p>Informações de contacto: Telefone/Fax: + 44 115 9704 800</p>	 <p>MDML INTL LTD, 10 McCurtain Hill Clonakilty, Co. Cork, P85 K230, República da Irlanda</p>		<p>POR IFU-R45-POR-12 IFU-RI45-POR-12 IFU-RHS45-POR-12</p>
---	--	---	---	---

Importante:

Estas Instruções de Utilização não podem ser utilizadas como um manual cirúrgico que descreva a utilização dos Clips de Ligadura. Se necessário, contacte a nossa empresa ou o seu distribuidor autorizado. O utilizador deve familiarizar-se com as instruções técnicas adequadas, rever a literatura médica profissional e obter formação formal sob a supervisão de um cirurgião com experiência em técnicas cirúrgicas minimamente invasivas. Recomendamos que reveja cuidadosamente todas as informações contidas nestas Instruções de utilização; a falta de atenção às instruções fornecidas abaixo pode ter consequências clínicas graves, tais como lesões no doente, contaminação, infeção cruzada ou morte.

Indicações:

Os removedores de clips de ligação Grena Click'aV® são indicados para abrir e remover os clips de ligação de polímero Grena Click'aV®, Click'aV Plus™ de qualquer tecido, se a remoção for necessária por qualquer motivo. Devido ao fecho seguro, os clips de ligação Click'aV® são muito difíceis de abrir com instrumentos cirúrgicos normais, pelo que se recomenda vivamente que o removedor esteja prontamente disponível durante a cirurgia que envolva a utilização de clips de ligação Click'aV®, Click'aV Plus .™

Contra-indicações:

Não existem contra-indicações conhecidas para o dispositivo.

Descrição do dispositivo:

Os Ligating Clips Removers são instrumentos cirúrgicos reutilizáveis. Estão disponíveis em versões para cirurgia aberta e cirurgia endoscópica, incluindo as versões bariátricas com 45 cm de comprimento (com o índice B no final do número de referência). Cada tamanho de clipe tem de ser removido com um removedor de clipe correspondente e compatível. Os endore movers não destacáveis estão equipados com um canal de lavagem e não precisam de ser desmontados para limpeza. A versão amovível necessita de ser desmontada para limpeza, desaparafusando a inserção do eixo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. O canal de lavagem da versão amovível ajuda a lavar os detritos do veio depois de a pastilha ser retirada. Os insertos de tamanho M e ML adaptam-se a punhos de 5 mm, enquanto os insertos L e XL adaptam-se a punhos de 10 mm.

Instruções de utilização:

1. Verificar a compatibilidade de todos os dispositivos antes de os utilizar.
2. Escolher o tipo e o tamanho adequados do removedor compatível com o clipe que se pretende abrir. Se estiver a ser utilizado um removedor endoscópico destacável, pegar no inserto compatível com o tamanho do clipe, inseri-lo no eixo da pega e enroscá-lo no sentido dos ponteiros do relógio até ocorrer resistência.
3. Agarrar o removedor pelas pegas, tal como um instrumento normal deste tipo, e aproximar as maxilas do clipe que se pretende abrir. Se for utilizado um removedor endoscópico, comprimir os seus punhos e inserir as maxilas e a haste do removedor na cânula. Manter a compressão sobre as pegas do removedor até que as maxilas saiam da cânula. Este procedimento é necessário porque o diâmetro interno da cânula é, na maioria dos casos, inferior à dimensão externa das maxilas abertas do removedor. A compressão das pegas do removedor pode também ser necessária durante a retirada do removedor da cânula.
4. O clipe deve ser aproximado pelo lado da dobradiça e não pelo lado do mecanismo de bloqueio.
5. Aproximar o clipe do tecido e rodar o removedor de modo a que as garras fiquem diretamente sobre e em linha com as pernas do clipe.
6. Avançar o removedor até que o utilizador visualize a dobradiça do grampo a repousar na parte de trás dos mordentes do removedor. A dobradiça do clipe DEVE assentar na parte de trás dos mordentes do removedor para garantir o desengate das pernas do clipe.
7. Fechar suavemente o removedor sobre o clipe e certificar-se de que nenhum tecido fica preso entre o clipe e as mandíbulas do instrumento e que cada perna do clipe toca na mandíbula correspondente. Utilizar a força adequada para fechar completamente o instrumento até se sentir um ligeiro clique. Isto indica que as pernas do clipe estão desengatadas.
8. Ao abrir as pegas do removedor, o clipe abre-se. Confirmar visualmente que o clipe está suficientemente aberto e que o dente do clipe está livre de qualquer tecido.
9. O removedor pode ser utilizado como uma pinça para o clipe aberto. Agarrar o clipe e retirá-lo do local da cirurgia mantendo a força de pressão no clipe. No caso de um procedimento endoscópico, o clipe aberto DEVE ser agarrado pela dobradiça para permitir a sua retirada através da cânula.

Compatibilidade:

Click'aV® e Click'aV Plus™ tamanho dos clips	Removedores de clips para cirurgia endoscópica Click'aV® compatíveis	Removedores de clips de cirurgia aberta Click'aV® compatíveis
M	0301-R804MLLE, 0301-R804MLLEB, 0301-R804MLLEI, 0301-R804MLLEIB, 0301-R804MLLEHS, 0301-R804MLLEHSB	0301-R804MMLL
ML	0301-R804MLLE, 0301-R804MLLEB, 0301-R804MLLEI, 0301-R804MLLEIB, 0301-R804MLLEHS, 0301-R804MLLEHSB	
L	0301-R804MLLE, 0301-R804MLLEB, 0301-R804MLLEI, 0301-R804MLLEIB, 0301-R804MLLEHS, 0301-R804MLLEHSB 0301-R804LXLE, 0301-R804LXLEB, 0301-R804LXLEI, 0301-R804LXLEIB, 0301-R804LXLEHS, 0301-R804LXLEHSB - recomendado principalmente	
XL	0301-R804LXLE, 0301-R804LXLEB, 0301-R804LXLEI, 0301-R804LXLEIB, 0301-R804LXLEHS, 0301-R804LXLEHSB	0301-R804XL

Compatível com os clips Grena Click'aV®, Click'aV Plus™ . Todos os removedores são também adequados para clips de polímero de outros fabricantes com o mesmo tipo e tamanho de mecanismo de bloqueio, desde que o tamanho do clipe corresponda ao tamanho do removedor. Para obter os melhores resultados, recomenda-se vivamente a utilização de removedores Grena concebidos para clips de ligação Click'aV® e Click'aV Plus™ .

Avisos e medidas de precaução:

1. Todos os procedimentos cirúrgicos e minimamente invasivos só devem ser efectuados por pessoas com formação adequada e familiarizadas com essas técnicas. Consultar a literatura médica relativa a técnicas, complicações e riscos antes de efetuar qualquer procedimento cirúrgico.
2. Os instrumentos cirúrgicos podem variar de fabricante para fabricante. Quando os instrumentos e acessórios cirúrgicos de diferentes fabricantes são utilizados em conjunto num procedimento, verifique a compatibilidade antes de iniciar o procedimento. Se tal não for feito, pode resultar na impossibilidade de efetuar a cirurgia.
3. Os removedores Click'aV® são compatíveis apenas com os clips Click'aV® e Click'aV Plus™ e não são compatíveis com os clips LigaV® ou Vclip®. Certifique-se sempre de que foi escolhido o tipo correto de removedor Grena's antes de iniciar o procedimento. Se tal não for feito, pode resultar na impossibilidade de efetuar a cirurgia.
4. Não utilizar o removedor como instrumento de dissecação ou de prensão.
5. Não apertar o removedor sobre outros instrumentos cirúrgicos, pois pode danificar tanto o removedor como o outro instrumento.
6. Não utilizar removedores danificados. A utilização de um removedor danificado pode resultar na incapacidade de abrir um clipe. Quando fechadas, as pontas dos mordentes devem estar diretamente alinhadas e não deslocadas. Verifique sempre o alinhamento das garras do removedor antes de o utilizar. Se tal não for feito, podem ocorrer lesões no doente.
7. É necessário verificar o local da ligadura após a remoção de um clipe, certificando-se de que não existe qualquer lesão tecidual clinicamente significativa. Em caso de lesão, deve ser aplicada uma técnica de reparação adequada.
8. Inspeccionar sempre o local para verificar a hemostase antes de terminar o procedimento. A hemorragia deve ser controlada por métodos cirúrgicos adequados.
9. O clipe aberto deve ser deitado fora e não deve ser aplicado novamente, mesmo que não haja danos visíveis.
10. O produto destina-se a ser utilizado exclusivamente por pessoal médico qualificado.
11. O produto requer uma eliminação adequada após a utilização, de acordo com todos os regulamentos locais aplicáveis, incluindo, sem limitação, os relativos à saúde e segurança humanas e ao ambiente.

Garantia dos removedores de grampos de ligadura

Todos os removedores de clips de ligadura Click'aV® da Grena estão cobertos por um ano de garantia. A Grena reparará gratuitamente qualquer removedor, desde que seja utilizado para fins cirúrgicos normais com clips de ligação Grena para os quais foi concebido e não tenha sido reparado por pessoal não autorizado. Se ocorrer uma avaria no removedor causada pela utilização de clips não Grena, a garantia não se aplica.


Instruções de reprocessamento:

As secções seguintes descrevem a preparação após a utilização dos removedores de clips ligantes Grena Click'aV® e Click'aV Plus™ .

Isto inclui o pré-tratamento no ponto de utilização, a limpeza e desinfeção manual, o processamento da máquina, bem como a esterilização a vapor no processo de vácuo fraccionado.

<p>ADVERTÊNCIAS</p>	<p>ATENÇÃO: O canal de descarga é longo e estreito. Necessita de uma atenção especial durante a limpeza para remover toda a sujidade. Não utilizar detergentes solidificantes.</p> <p>ATENÇÃO: O utilizador/transformador deve cumprir a legislação e os regulamentos locais nos países onde os requisitos de reprocessamento são mais rigorosos do que os descritos neste manual. Para além disso, devem ser observados os regulamentos de higiene hospitalar, bem como as recomendações das associações profissionais relevantes.</p> <p>ATENÇÃO: Os dispositivos usados devem ser cuidadosamente processados de acordo com estas instruções antes de serem utilizados.</p> <p>ATENÇÃO: As Precauções Universais devem ser observadas por todo o pessoal do hospital que trabalha com dispositivos médicos contaminados ou potencialmente contaminados. Deve ter-se cuidado ao manusear dispositivos com pontas afiadas ou arestas cortantes.</p> <p>ATENÇÃO: Durante todas as etapas de reprocessamento, deve ser usado equipamento de proteção individual (EPI) quando se manuseia ou trabalha com materiais, dispositivos e equipamento contaminados ou potencialmente contaminados. O EPI inclui batas, máscaras, óculos de proteção ou proteções faciais, luvas e proteções para sapatos. Respeitar as regras habituais para o manuseamento de objectos contaminados e as seguintes medidas de precaução: - Utilizar luvas de proteção ao tocar. - Isolar o material contaminado utilizando uma embalagem e rotulagem adequadas.</p> <p>ATENÇÃO: Não colocar instrumentos pesados em cima de dispositivos delicados. Não devem ser utilizadas escovas metálicas ou esfregões durante os procedimentos de limpeza manual. Estes materiais danificam a superfície e o acabamento dos instrumentos. Devem ser utilizadas escovas de cerdas macias, escovas de nylon e escovas de limpeza de tubos.</p> <p>ATENÇÃO: Não permita que os dispositivos contaminados sequem antes do reprocessamento. Todos os passos de limpeza e esterilização subsequentes são facilitados se não permitir que sangue, fluidos corporais, resíduos de ossos e tecidos, solução salina ou desinfetantes sequem nos dispositivos utilizados. Os dispositivos usados devem ser transportados para a central de abastecimento em contentores doseados ou cobertos para evitar riscos de contaminação desnecessários.</p> <p>ATENÇÃO: Depois de terminado o tratamento, todas as peças que entram em contacto com o doente devem ser limpas e desinfetadas.</p> <p>ATENÇÃO: Utilizar apenas produtos de limpeza/desinfecção aprovados para o reprocessamento de dispositivos médicos. Respeitar as instruções do fabricante para os produtos de limpeza/desinfecção. A utilização de soluções de limpeza ou desinfecção inadequadas, ou a aplicação de procedimentos de limpeza ou desinfecção inadequados, pode ter consequências negativas para os dispositivos: - Danos ou corrosão - Descoloração do produto - Corrosão de peças metálicas - Redução da vida útil - Vencimento da garantia</p> <p>ATENÇÃO: A Grena Ltd. recomenda a utilização exclusiva de máquinas de lavar e desinfetar conformes com a norma EN ISO 15883-1 e -2 para a limpeza/desinfecção automatizada. Recomenda-se que, se possível, seja dada preferência ao reprocessamento mecânico em relação aos métodos de reprocessamento manual.</p>
<p>Limitações ao reprocessamento</p>	<p>Os instrumentos são fornecidos não esterilizados e devem ser limpos e esterilizados antes de cada utilização. No caso dos dispositivos endoscópicos, a primeira lavagem deve ser efectuada com um aparelho de limpeza ultrassónico para remover o conservante do dispositivo. Os parâmetros recomendados são 3 min, 40°C, 35 kHz. A utilização extensiva ou o reprocessamento repetido podem ter um impacto significativo nos instrumentos. A vida útil do produto é determinada pelas impressões de desgaste e danos devidos à utilização. Não utilizar instrumentos danificados ou corrodos. A utilização de água dura deve ser evitada. Pode ser utilizada água da torneira amaciada para o enxaguamento inicial. Deve ser utilizada água purificada para o enxaguamento final, de modo a eliminar os depósitos de calcário nos dispositivos. Pode ser utilizado um ou mais dos seguintes processos para purificar a água: ultrafiltro (UF), osmose inversa (RO), desionizado (DI) ou equivalente.</p>
<p>INSTRUÇÕES</p>	
<p>Ponto de utilização:</p>	<p>Deve ser efectuada uma pré-limpeza dos dispositivos imediatamente após o tratamento, tendo em conta a proteção pessoal. O objetivo é impedir que a matéria orgânica e os resíduos químicos sequem no lúmen ou nas partes exteriores dos instrumentos e evitar a contaminação da área circundante.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Remover o excesso de sujidade, fluidos corporais e tecidos com um pano descartável ou um toalhete de papel. 2. Submergir o instrumento na água (temperatura inferior a 40°C) imediatamente após a utilização. 3. Não utilizar detergentes solidificantes ou água com temperatura superior a 40°C, pois podem provocar a aderência da terra e influenciar as etapas seguintes do reprocessamento.
<p>Contenção e transporte:</p>	<p>Recomenda-se que os dispositivos sejam reprocessados logo que seja razoavelmente prático após a sua utilização. Para evitar quaisquer danos, os dispositivos devem ser armazenados em segurança e transportados para o local de reprocessamento posterior num recipiente fechado (por exemplo, cuba com tampa) para evitar a contaminação da área circundante O tempo máximo entre a pré-limpeza do instrumento e as fases seguintes de limpeza não deve exceder 1 hora. Transportar os instrumentos para a sala de processamento e colocá-los na bacia com solução de limpeza.</p>
<p>Preparação para a limpeza:</p>	<p>A desmontagem é necessária apenas para os removedores endoscópicos amovíveis. Estes podem ser reconhecidos pelo HS como uma parte do número de referência impresso no punho. Para desmontar, agarrar a parte distal do eixo com dois dedos e rodar o botão rotativo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para desapertar a inserção. Retire o inserto do veio. Para montar, siga a sequência inversa. Não tente segurar o removedor pelos mordentes para o procedimento de desmontagem/montagem, mas sim diretamente atrás deles na dobradiça, caso contrário, o alinhamento correto dos mordentes pode ser afetado. O alinhamento correto dos mordentes é essencial para que os aplicadores de clips funcionem corretamente. Todos os agentes de limpeza devem ser preparados com a diluição e a temperatura recomendadas pelo fabricante. Pode ser utilizada água da torneira amaciada para preparar os agentes de limpeza. A utilização das temperaturas recomendadas é importante para um desempenho ótimo dos agentes de limpeza. NOTA: Devem ser preparadas soluções de limpeza novas quando as soluções existentes ficarem muito contaminadas (com sangue e/ou turvas).</p>
<p>Limpeza/desinfecção: Manual</p>	<p>Equipamento: detergente enzimático proteolítico de pH neutro ou alcalino, escova macia, pistola de pressão de limpeza ou seringa de grande volume.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mergulhar o instrumento na solução de lavagem/desinfecção e seguir as instruções do fabricante do desinfetante. (Para a validação, foi utilizado Secusept Plus a 4%, 15 min, 30-35°C). 2. Utilizando uma escova e mantendo o dispositivo dentro da solução de imersão, aplique a solução de lavagem/desinfecção em todas as superfícies, assegurando que os maxilares são limpos nas posições aberta e fechada. Certificar-se de que toda a contaminação visível foi removida. Lavar o interior do veio com a solução, se o instrumento estiver equipado com um canal de lavagem. 3. Enxaguar com água da torneira (abaixo de 40°C), accionando o dispositivo até não haver qualquer sinal de sangue ou sujidade no dispositivo ou na corrente de enxaguamento, mas durante pelo menos 3 minutos. 4. Se o instrumento estiver equipado com um canal de lavagem, utilize uma pistola de pressão de limpeza ou uma seringa de grande volume para lavar agressivamente o interior do eixo com água da torneira (abaixo de 40°C). Este procedimento deve ser efectuado através da porta de lavagem no lado proximal do eixo até que não haja sujidade visível no eixo. 5. Se o instrumento estiver equipado com um canal de lavagem, secá-lo com ar medicinal comprimido 6. Se os procedimentos internos do hospital exigirem a utilização de uma máquina de limpeza por ultra-sons, os parâmetros recomendados são 3 min, 40°C, 35 kHz com adição de um produto de limpeza/desinfetante. O processo foi validado com 2% de Sekusept Aktiv. Este processo pode ser utilizado para além do processo de limpeza manual ou como pré-tratamento para o processo de reprocessamento automático. 7. Enxaguar com água corrente limpa, incluindo o canal de lavagem (se equipado), enquanto se acciona o dispositivo. Para este passo, deve ser utilizada água UF, RO ou DI. 8. Remova o excesso de humidade do dispositivo com um toalhete limpo, absorvente e que não solte pêlos. Secar o dispositivo com ar médico comprimido, incluindo o canal de lavagem (se equipado). <p>NOTA: Não se deve esquecer que qualquer processo de limpeza e desinfecção deve ser validado. Verifique visualmente a limpeza para se certificar de que todos os resíduos foram removidos. Se não estiver visualmente limpo, repita os passos de reprocessamento até o dispositivo estar visualmente limpo.</p> <p>NOTA: Recomenda-se que as escovas de limpeza usadas sejam limpas após cada utilização (se possível, num aparelho de limpeza por ultra-sons) e depois desinfetadas. No final do dia, após a limpeza e desinfecção, devem ser armazenadas secas e protegidas contra a contaminação.</p>
<p>Limpeza/desinfecção: Automatizado</p>	<p>Equipamento - Máquina de lavar/desinfetar, detergente enzimático proteolítico de pH neutro ou alcalino. Os instrumentos endoscópicos têm canais, fendas e juntas finas. A sujidade seca é muito difícil de remover destas áreas através da limpeza automática. Para conseguir uma limpeza eficaz, é necessário remover as impurezas maciças antes do reprocessamento automático, pelo que a Grena Ltd. recomenda a pré-limpeza manual. Em particular, certifique-se de que limpa previamente o veio antes da limpeza na máquina de lavar/desinfetar. A Grena Ltd. recomenda a utilização de um dispositivo de limpeza/desinfecção em conformidade com a norma EN ISO 15883-1 e -2 em combinação com um suporte de carga adequado. Siga as instruções de utilização do fabricante da máquina de lavar/desinfetar. Colocar os instrumentos na máquina de lavar/desinfetar de acordo com as instruções do fabricante. Ligar os canais de lavagem (se equipados) dos instrumentos à máquina de lavar/desinfetar para que sejam enxaguados. Os seguintes parâmetros de processo são adequados para o reprocessamento dos instrumentos: 1. Pré-lavagem a frio, água <40°C, 2min. 2. Lavagem, água quente, 10 minutos, concentração de detergente e temperatura de acordo com as recomendações do fabricante (processo validado com 8% Thermosept Xtra, 55°C). 3. Neutralização, concentração do agente neutralizante e tempo de acordo com as recomendações do fabricante (processo validado com Thermosept NKZ a 2%, 42°C, 1 min). 4. Enxaguamento, água fria abaixo de 40°C, 1 min.</p>

	<p>5. Desinfecção térmica 93°C, 5 min, concentração de aditivo de acordo com a recomendação do fabricante (processo validado com 0,2% de Thermosept BSK).</p> <p>6. Secagem 120°C, 30min.</p> <p>NOTA: Não se deve esquecer que qualquer processo de limpeza e desinfecção deve ser validado.</p> <p>NOTA: Os parâmetros validados correspondem a um processo com um valor A0 de > 3000s. A Grena Ltd. recomenda a utilização exclusiva de processos com um valor A0 > 3000s.</p> <p>ATENÇÃO: Nunca deixar os instrumentos molhados após o reprocessamento. Isto pode levar à corrosão e ao desenvolvimento de germes. Se os dispositivos não estiverem completamente secos após o processamento da máquina, secar os removedores manualmente (ver ponto de secagem) e armazenar em conformidade.</p>										
Secagem:	Seque a humidade restante com um pano limpo, absorvente e que não solte pêlos. Utilize ar medicinal comprimido ou uma seringa de grande volume para soprar o canal de lavagem e a dobradiça dos maxilares até que não haja mais fugas de humidade.										
Manutenção:	As dobradiças e outras peças móveis devem ser lubrificadas com um produto solúvel em água destinado a instrumentos cirúrgicos que têm de ser esterilizados. As datas de validade do fabricante devem ser respeitadas, tanto para as concentrações de stock como para as concentrações de diluição de uso dos agentes de limpeza/desinfecção.										
Inspecção e testes de funcionamento:	<p>Inspecionar o dispositivo quanto à sua funcionalidade - em caso de deficiência técnica, o instrumento deve ser rejeitado.</p> <p>Verifique a ação das peças móveis (por exemplo, maxilas, dobradiças, conectores, etc.) para garantir um funcionamento suave em toda a gama de movimentos pretendida. Verificar se os mordentes têm folga excessiva. Inspecionar visualmente a existência de danos e desgaste. Preste atenção ao alinhamento correto dos mordentes.</p> <p>Verificar se o veio está deformado. Inspecione cuidadosamente cada dispositivo para garantir que toda a contaminação visível foi removida. Se for detectada contaminação, repita o processo de limpeza/desinfecção. Eliminar os instrumentos danificados.</p>										
Embalagem:	<p>Individualmente: Podem ser utilizadas bolsas ou invólucros de esterilização a vapor de qualidade médica, disponíveis no mercado. Certifique-se de que a embalagem é suficientemente grande para conter o dispositivo sem forçar os selos. Não utilize embalagens demasiado grandes para evitar que os instrumentos deslizem dentro da embalagem.</p> <p>Em conjuntos: Os instrumentos podem ser colocados em tabuleiros de esterilização de uso geral. Os tabuleiros e caixas com tampas podem ser embrulhados em película de esterilização a vapor de qualidade médica normal. Certifique-se de que as mandíbulas estão protegidas.</p> <p>O peso total de um tabuleiro ou caixa de instrumentos embalados não deve exceder 11,4 kg/25 lbs para segurança do pessoal que manuseia os conjuntos de instrumentos; as caixas de instrumentos que excedam 11,4 kg/25 lbs devem ser divididas em tabuleiros separados para esterilização. Todos os dispositivos devem ser dispostos de forma a garantir a penetração do vapor em todas as superfícies dos instrumentos. Os instrumentos não devem ser empilhados ou colocados em contacto próximo. O utilizador deve certificar-se de que a mala de instrumentos não é inclinada ou que o conteúdo não é deslocado depois de os dispositivos estarem arrumados na mala. Podem ser utilizados tapetes de silicone para manter os dispositivos no lugar.</p> <p>Os dispositivos para validação do processo de esterilização foram embalados em bolsas em conformidade com a norma EN ISO 11607-1.</p>										
Esterilização:	<p>Equipamento: A Grena Ltd. recomenda a utilização de um esterilizador de acordo com a norma EN ISO 17665 ou EN 285. A esterilização deve ser efectuada em embalagens adequadas ao processo de esterilização. A embalagem deve estar em conformidade com a norma EN ISO 11607 (por exemplo, papel / película laminada).</p> <p>A esterilização por calor húmido/vapor é o método preferido e recomendado para os dispositivos Grena.</p> <p>O hospital é responsável pelos procedimentos internos de inspecção e acondicionamento dos instrumentos depois de estes terem sido cuidadosamente limpos, de forma a garantir a penetração do vapor e uma secagem adequada. O hospital também deve recomendar disposições para a proteção de quaisquer áreas afiadas ou potencialmente perigosas dos instrumentos.</p> <p>As instruções do fabricante do esterilizador relativas às operações e à configuração da carga devem ser seguidas explicitamente. Quando esterilizar vários conjuntos de instrumentos num ciclo de esterilização, certifique-se de que a carga máxima indicada pelo fabricante não é excedida.</p> <p>Os conjuntos de instrumentos devem ser devidamente preparados e embalados em tabuleiros e/ou caixas que permitam que o vapor penetre e entre em contacto direto com todas as superfícies.</p> <p>CUIDADO: A esterilização por gás plasma não deve ser utilizada.</p> <p>ATENÇÃO: Nunca esterilizar instrumentos que não tenham sido limpos! O sucesso de uma esterilização depende do estado de limpeza anterior!</p> <p>Os parâmetros mínimos validados de esterilização a vapor necessários para atingir um nível de garantia de esterilidade (SAL) de 10⁻⁶ são os seguintes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de ciclo</th> <th>Temperatura [°C]</th> <th>Tempo de exposição [min]</th> <th>Pressão [bar]</th> <th>Tempo de secagem [min]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pré-vácuo fraccionado 10 kPa</td> <td>134</td> <td>3</td> <td>>3</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>NOTA: Deve lembrar-se que qualquer processo de esterilização deve ser validado antes da sua utilização. A validação da adequação dos parâmetros acima referidos para o processo de vácuo fraccionado foi realizada pela Grena de acordo com os requisitos da norma EN ISO 17665-1. O utilizador é responsável pela validação do funcionamento correto do esterilizador.</p>	Tipo de ciclo	Temperatura [°C]	Tempo de exposição [min]	Pressão [bar]	Tempo de secagem [min]	Pré-vácuo fraccionado 10 kPa	134	3	>3	15
Tipo de ciclo	Temperatura [°C]	Tempo de exposição [min]	Pressão [bar]	Tempo de secagem [min]							
Pré-vácuo fraccionado 10 kPa	134	3	>3	15							
Armazenamento:	Os instrumentos esterilizados e embalados devem ser armazenados numa área designada, de acesso limitado, bem ventilada e protegida contra poeiras, insectos, parasitas e temperaturas/humidade extremas.										
Informações adicionais:	<p>As instruções fornecidas acima foram recomendadas pelo fabricante do dispositivo médico como sendo CAPAZ de preparar um dispositivo médico para reutilização. Continua a ser da responsabilidade do processador garantir que o processamento, tal como efetivamente realizado, utilizando equipamento, materiais e pessoal nas instalações de processamento, atinja o resultado desejado. Isto exige a validação e o controlo de rotina do processo. Da mesma forma, qualquer desvio do processador em relação às recomendações fornecidas deve ser devidamente avaliado quanto à eficácia e às potenciais consequências adversas. Os utilizadores devem então estabelecer um protocolo de limpeza adequado para os dispositivos médicos reutilizáveis utilizados nas suas instalações, utilizando as recomendações do fabricante do dispositivo e do fabricante do produto de limpeza.</p> <p>Devido às muitas variáveis envolvidas na esterilização/descontaminação, cada instalação médica deve calibrar e verificar o processo de esterilização/descontaminação (por exemplo, temperaturas, tempos) utilizado com o seu equipamento.</p> <p>É da responsabilidade do estabelecimento de saúde garantir que o reprocessamento é efectuado utilizando o equipamento e os materiais adequados e que o pessoal do estabelecimento de reprocessamento recebeu formação adequada para alcançar o resultado pretendido.</p>										
Um aviso ao utilizador e/ou doente:	Se tiver ocorrido algum incidente grave relacionado com o dispositivo, este deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro.										
Contacto do fabricante:	Ver o cabeçalho das instruções de utilização.										

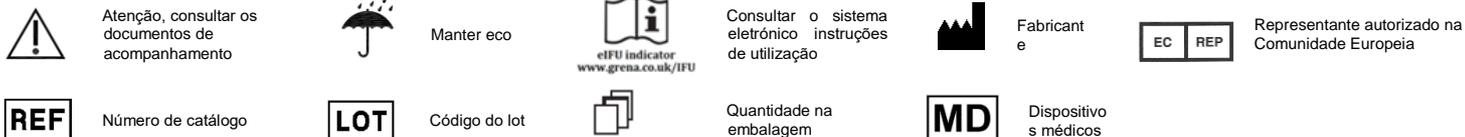

*As cópias impressas das instruções de utilização fornecidas com os produtos Grena estão sempre em E inglês.
Se necessitar de uma cópia impressa das Instruções de Utilização noutra língua, pode contactar a Grena Ltd.
em ifu@grena.co.uk ou + 44 115 9704 800.*

*Digitalize o código QR abaixo com a aplicação adequada.
O sítio Web da Grena Ltd. é o ponto de partida para a escolha da eIFU na sua língua preferida.*

Pode aceder diretamente ao sítio Web, digitando www.grena.co.uk/IFU no seu navegador.

*Certifique-se de que a versão em papel das Instruções de Utilização na sua posse é a última revisão antes de utilizar o dispositivo.
Utilizar sempre as Instruções de Utilização na sua última revisão.*

