




Dreny łączące Instrukcja obsługi

Nr kat.: 0201- ... ; 0215- ... (Wszystkie długości i typy łączników. Sterylne i niesterylne) ; 0203-YCT

 <p>Grena (Qingdao) Medical Devices Ltd., No 318 Huanghe West Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province, 266555, China</p>	<p>Informacje kontaktowe: Phone: +86 0532-86769190 Fax: +86 0532-86767322</p>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">EC</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px; margin-left: 10px;">REP</div> <p>MDML INTL LTD., 10 McCurtain Hill Clonakilty, Co. Cork, P85 K230, Republic of Ireland</p>	  0197
--	--	---	--

Wskazania:

Dreny łączące i łączniki stosowane są w chirurgii, medycynie wewnętrznej, ginekologii, medycynie bariatrycznej i pediatrii dołączenia:

1. kanki ssącej ze źródłem ssania,
2. cewnika do odsysania ze źródłem ssania,
3. drenów ze zbiornikami kolekcyjnymi,
4. innych urządzeń medycznych w celu przesyłania gazów lub płynów,
5. dren łączący Y stosowany jest do podłączenia dwóch drenów do klatki piersiowej z zestawem do drenażu klatki piersiowej.

Przeciwwskazania:

Dreny łączące nie powinny być używane do przesyłania tlenu, palnych gazów lub płynów oraz gazów i płynów o niszczącym wpływie na PCV. Łączniki wykonano z PCV, PC lub PP

Opis wyrobu:

Dreny łączące dostępne są w wersji sterylnej i niesterylnej w wielu długościach, średnicach i z różnymi łącznikami. Przeznaczone są do jednorazowego użytku i wykonano je z PCV klasy medycznej.

Instrukcja użycia:

1. Wybierz właściwy rozmiar oraz typ drenu łączącego i łącznika.
2. Otwórz opakowanie jednostkowe stosując zasady aseptyki (w przypadku wyrobu sterylne).
3. Połącz urządzenia wedle potrzeb.
4. Jeśli stosowany jest dren typu cut-off dotnij wymagany odcinek drenu. Linia cięcia jest wyraźnie widoczna na środku każdego podwójnego łącznika. Następnie postępuj zgodnie z punktem 3.
5. Jeśli stosowany jest dren balonowy dotnij wymagany odcinek drenu. Linia cięcia może przebiegać w każdym miejscu, ale cięcie w miejscu balonowatego poszerzenia pozwala uzyskać różne wewnętrzne i zewnętrzne średnice oraz stożkowate lub lejcowate ukształtowanie końca drenu.
6. Jeśli stosowany jest dren podwójny zwróć uwagę, że składa się on z dwóch oddzielnych drenów połączonych bok do boku na całej długości. Mogą one zostać od siebie oddzielone na wymaganej długości poprzez pociągnięcie na boki obu drenów na dowolnym z końców.
7. Jeśli stosowany jest dren łączący Y połącz żeński łącznik drenu łączącego z drenem pacjenta zestawu do drenażu klatki piersiowej. Dwa łączniki męskie drenu łączącego połącz z drenami do drenażu klatki piersiowej.
8. Jeśli stosowany jest dren łączący typu SC należy przy pomocy zintegrowanej zatyczki zamknąć boczny otwór łącznika do cewnika, aby uzyskać ssanie ciągłe. Dla uzyskania efektu przerywanego i kontrolowanego odsysania zatyczka powinna pozostać otwarta a boczny otwór należy przymykać kciukiem dla rozpoczęcia ssania i kontroli jego siły.
9. Jeśli stosowany jest dren łączący typu VS jest on aktywowany poprzez dotknięcie kciukiem bocznego otworu łącznika. Zdjęcie kciuka z bocznego otworu zamyka dren i dezaktywuje ssanie. Hak na łączniku pozwala na zawieszenie kiedy wyrób nie jest użytkowany.
10. Jeśli dren łączący posiada zatyczkę wykorzystaj ją do zabezpieczenia łącznika przed zanieczyszczeniem podczas przerw w użytkowaniu.

Dodatkowe ostrzeżenia i środki ostrożności:

1. Zawsze sprawdź szczelność połączeń przed użyciem i kontroluj je okresowo.
2. Wyrzucić dren jeśli opakowanie zostało otwarte bez względu na to czy został on użyty czy nie.
3. Użyj natychmiast po otwarciu opakowania.
4. Wyrób wymaga odpowiedniej utylizacji po użyciu pozostającej w zgodzie z obowiązującymi lokalnie regulacjami włączając bez ograniczeń te, które odnoszą się do ludzkiego zdrowia i bezpieczeństwa oraz środowiska.
5. Wyrób przeznaczony jest do użycia dla jednego pacjenta podczas pojedynczego zabiegu. Resterylizacja, powtórne użycie, odzyskiwanie, modyfikacja mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.
6. Wyrób przeznaczony jest do użycia wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny.



Wyrób jednorazowego użytku



Wyrób niesterylny



Chronić przed wilgocią



Zapoznaj się z instrukcją użycia



Wytwórca



Sterylizacja tlenkiem etylenu



Uwaga, zapoznaj się z załączoną dokumentacją



Nie resterylizować



Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone



Autoryzowany Przedstawiciel na terenie UE

* Odnosi się wyłącznie do wersji sterylnej

** Odnosi się wyłącznie do wersji niesterylnej

Numer Jednostki Notyfikowanej obok znaku CE odnosi się wyłącznie do wyrobów sterylnych