




Stapler skórný i kleszczyki do usuwania zszywek skórných
Instrukcja obsługi

Nr kat.: SSG-15W, SSG-25W, SSG-35W, SSG-55W, SSG-15R, SSG-25R, SSG-35R, SSG-55R, SSG-15H, SSG-25H, SSG-35H, SSG-55H, SRG-U

 <p>GRENA^{DC} Think Medical[®]</p> <p>Grena (Qingdao) Medical Devices Ltd., No 318 Huanghe West Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province, 266555, China</p>	<p>Informacje kontaktowe: Phone: +86 0532-86769190 Fax: +86 0532-86767322</p>	 <p>MDML INTL LTD., 10 McCurtain Hill Clonakilty, Co. Cork, P85 K230, Republic of Ireland</p>	
--	--	---	---

Wskazania:

STAPLER SKÓRNÝ – wyrób jest przeznaczony do zamykania ran chirurgicznych i innych w szerokiej gamie zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej, klatki piersiowej, położniczej, ginekologicznej, ortopedycznej, sercowo-naczyniowej, urologicznej i plastycznej.

KLESZCZYKI DO USUWANIA ZSZYWEK SKÓRNÝCH – wyrób jest przeznaczony do usuwania zszywek skórných, które zostały użyte do zamknięcia rany.

Przeciwwskazania:

Staplerów skórných nie należy używać jeśli nie jest możliwym zachowanie 5 mm odległości pomiędzy powierzchnią zszywanej skóry i leżącymi poniżej naczyniami, ważnymi nerwami, narządami wewnętrznymi, kośćmi oraz tkanką łączną w postaci ścięgien i więzadeł.

Opis użycia:

STAPLER SKÓRNÝ

1. Unieś, wywrń i dopasuj brzegi skóry przy pomocy pęsety.
2. Umieść stapler ponad środkiem wywiniętych brzegów skóry poprzecznie do linii cięcia i utrzymuj odległość około 1 – 2 mm powyżej skóry, aby umożliwić powstanie niewielkiej przerwy pomiędzy górną poprzeczką założonej zszywki a powierzchnią skóry, co ułatwi późniejsze usunięcie zszywki.
3. Zamknij stapler ściskając spust ciągłym ruchem do oporu.
4. Zwolnij spust celem uwolnienia zszywki.

KLESZCZYKI DO USUWANIA ZSZYWEK SKÓRNÝCH

1. Wsuń dolne szczęki kleszczyków (ze szczeliną pomiędzy nimi) pod górną poprzeczkę zszywki.
2. Ściśnij rękojeści kleszczyków całkowicie do oporu. Nie unosz ani nie ciągnij kleszczyków.
3. Upewnij się, że zszywka zmieniła swój kształt na przypominający literę M. Unieś kleszczyki delikatnie wysuwając końcówki zszywki ze skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

1. Zapoznaj się z instrukcją przed użyciem.
2. Zaleca się aby zszywki zakładać co 5 mm. Do ran poniżej 5 cm zaleca się stapler z 15 zszywkami, od 5 do 10 cm z 25 zszywkami, od 10 do 15 cm z 35 zszywkami a od 15 do 25 cm z 55 zszywkami.
3. Pierwsze 3 zszywki powinny zostać wystrzelone poza raną. Upewnij się, że zostały one ukształtowane prawidłowo i dopiero wtedy użyj staplera.
4. Zawsze ściskaj spust do oporu. Przedwczesne zwolnienie spustu i ponowne jego ściśnięcie może sprawić, że wystrzelona zostanie kolejna zszywka zanim poprzednia zostanie uwolniona. Może to zablokować stapler.
5. Zszywki nie powinny pozostawać w ciele dłużej niż 30 dni.
6. Usunięte zszywki są ostre i potencjalnie niebezpieczne. Postępuj zgodnie z procedurami przyjętymi w szpitalu dla uchronienia siebie i pozostałego personelu przed przypadkowym zranieniem.

Wyrób przeznaczony do użycia wyłącznie przez wykwalifikowany personel lekarski. Narzędzie wymaga odpowiedniej utylizacji po użyciu.



Wyrób jednorazowego użytku



Sterylizacja tlenkiem etylenu



Chronić przed wilgocią



Zapoznaj się z instrukcją użycia



Wytwórca



Uwaga, zapoznaj się z załączoną dokumentacją



Nie resterylizować



Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone



Autoryzowany Przedstawiciel na terenie UE