

## Kanki i zestawy do odsysania Instrukcja obsługi

Nr kat.: 0202-.....

 <b>GRENA<sup>®</sup></b> Think Medical Grena (Qingdao) Medical Devices Ltd., No 318 Huanghe West Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province, 266555, China	<b>Infoemacje kontaktowe:</b> Phone: +86 0532-86769190 Fax: +86 0532-86767322	 <b>MDML INTL Limited</b> , 10 McCurtain Hill Clonakilty, Co. Cork Republic of Ireland	
---	---	--	---

### Wskazania:

Kanki i zestawy do odsysania stosowane są do usuwania płynów z pola operacyjnego podczas zabiegów chirurgicznych.

### Przeciwwskazania:

Kanek i zestawów do odsysania nie należy używać jeśli delikatna tkanka mogłaby zostać uszkodzona przez ssanie.

### Opis wyrobu:

Kanki i zestawy do odsysania są wyrobami sterylnymi i przeznaczonymi do jednorazowego użytku. Wykonane zostały z materiałów klasy medycznej. W razie potrzeby kanka może być z łatwością odłączona od drenu łączącego i wymieniona na nową.

### Opis użycia:

1. Wybierz właściwy rozmiar i typ kanki lub zestawu do odsysania.
2. Otwórz opakowanie jednostkowe zgodnie z zasadami aseptyki i wyłóż produkt na sterylną powierzchnię.
3. Połącz kankę do odsysania z łącznikiem odpowiedniego drenu łączącego i sprawdź szczelność połączenia. Jeśli zestaw do odsysania jest wstępnie zmontowany sprawdź jedynie szczelność połączenia.
4. Połącz drugi łącznik drenu łączącego ze źródłem ssania.
5. Ustaw odpowiednią siłę ssania.
6. Zanurz końcówkę kanki do odsysania poniżej poziomu płynu, aby ewakuować go z pola operacyjnego.
7. Jeśli kanka posiada boczny otwór zamknijcie go palcem wskazującym uruchamia ssanie, natomiast otwarcie przerywa ssanie.
8. Kanka Pool składa się z wewnętrznej kaniuli i zewnętrznej ruchomej perforowanej osłony. Osłonę można zablokować w pozycji proksymalnej eksponując koniec kaniuli wewnętrznej dla odsysania punktowego lub w pozycji dystalnej dla ewakuacji płynu poprzez perforowaną powierzchnię osłony.

### Dodatkowe ostrzeżenia i środki ostrożności:

1. Zawsze sprawdź szczelność połączeń przed rozpoczęciem zabiegu.
2. Ustaw taką siłę ssania, która pozwoli uniknąć uszkodzenia delikatnych tkanek.
3. Wyrzuć wszystkie kanki i zestawy do odsysania z otwartych opakowań, bez względu czy zostały użyte czy nie.
4. Użyj natychmiast po otwarciu opakowania.
5. Wyrób wymaga odpowiedniej utylizacji po użyciu pozostającej w zgodzie z obowiązującymi lokalnie regulacjami włączając bez ograniczeń te, które odnoszą się do ludzkiego zdrowia i bezpieczeństwa oraz środowiska.
6. Wyrób przeznaczony jest do użycia dla jednego pacjenta podczas pojedynczego zabiegu. Resterylizacja, powtórne użycie, odzyskiwanie, modyfikacja mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.
7. Wyrób przeznaczony jest do użycia wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny.



Autoryzowany Przedstawiciel  
we Wspólnocie Europejskiej



Chronić przed wilgocią



Uwaga, zapoznaj się z  
załączoną dokumentacją



Zapoznaj się z instrukcją  
użycia



Nie resterylizować



Wytwórca



Nie u otwarte lub uszkodzone  
używać, jeśli opakowanie