



Ortopedyczne kanki odsysające i ortopedyczne zestawy odsysające
Instrukcja obsługi

Nr kat.: 0202-XXXCKFT, 0202-30007SSXCKFT

 <p>GRENA[®] Think Medical</p> <p>Grena (Qingdao) Medical Devices Ltd., No 318 Huanghe West Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province, 266555, China</p>	<p>Informacje kontaktowe: Phone: +86 0532-86769190 Fax: +86 0532-86767322</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">EC</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;">REP</div> <p>MDML INTL LTD., 10 McCurtain Hill Clonakilty, Co. Cork, P85 K230, Republic of Ireland</p>	
---	--	---	---

Wskazania:

Ortopedyczne kanki odsysające i ortopedyczne zestawy odsysające stosowane są do ewakuacji płynów od pacjenta podczas zabiegów ortopedycznych, podczas których można spodziewać się obecności fragmentów kostnych w polu operacyjnym.


Przeciwwskazania:

Ortopedyczne kanki odsysające i ortopedyczne zestawy odsysające nie powinny być stosowane jeśli istnieje obawa uszkodzenia delikatnych tkanek na skutek ssania.

Opis wyrobu:

Ortopedyczne kanki odsysające i zestawy odsysające są sterylne i przeznaczone do jednorazowego użytku. Wykonane zostały w materiałach klasy medycznej. Kankę można z łatwością odłączyć od drenu łączącego i zastąpić inną jeśli istnieje taka potrzeba. Wbudowany filtr zatrzymuje w kance fragmenty kostne pozwalając na swobodny przepływ płynu. W razie potrzeby filtr można wymienić. Wymienne końcówki ułatwiają dostosowanie kanki do warunków danej procedury.

Opis użycia:

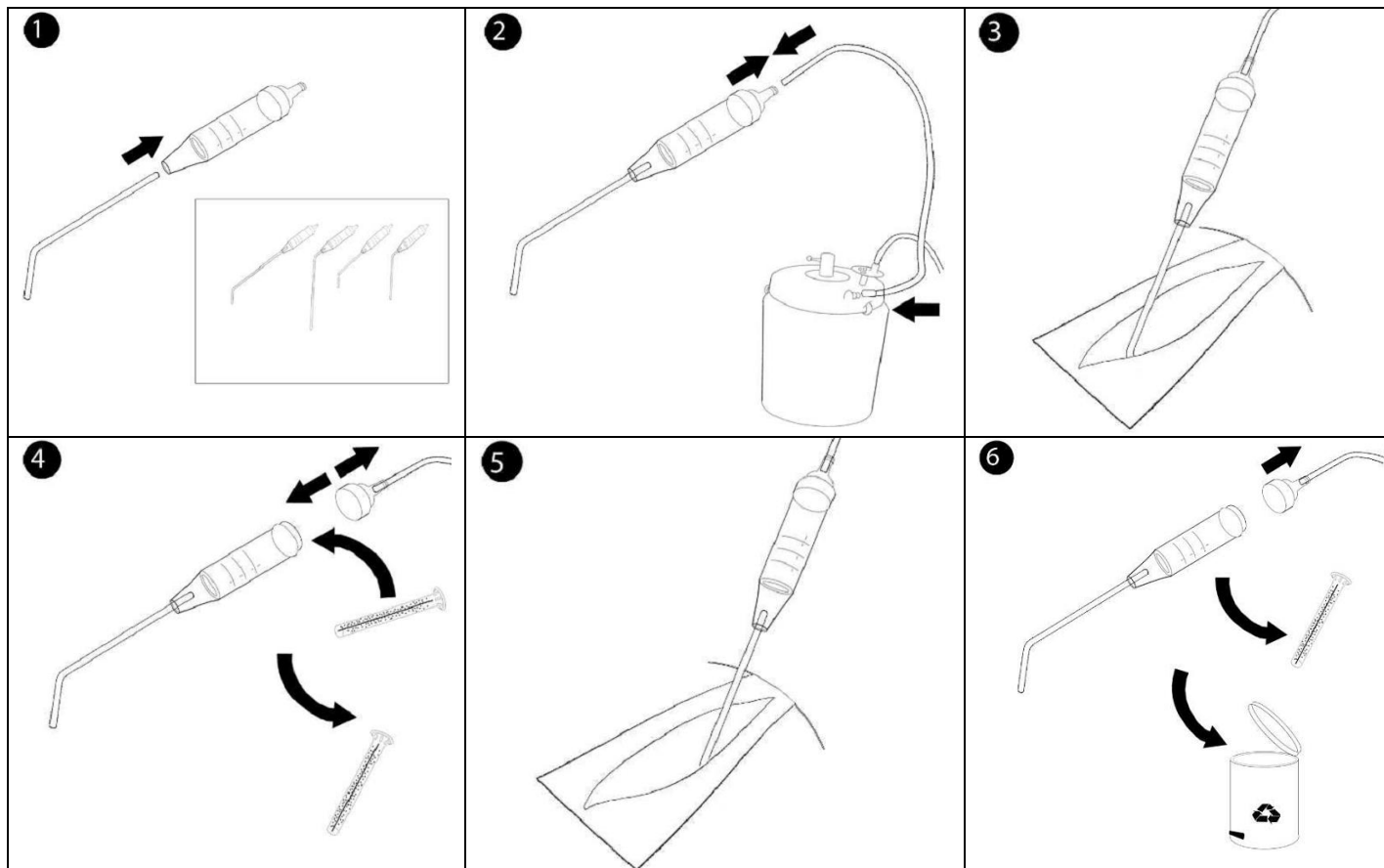

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Zawsze sprawdź szczelność połączeń przed zabiegiem.
- Wyreguluj siłę ssania do poziomu pozwalającego uniknąć uszkodzeń delikatnych tkanek.
- Wyrzuc wszystkie odpakowane kanki odsysające i zestawy odsysające bez względu czy były użyte, czy też nie.
- Użyj natychmiast po rozpakowaniu.
- Wyrób wymaga odpowiedniej utylizacji po użyciu pozostającej w zgodzie z obowiązującymi lokalnie regulacjami włączając bez ograniczeń te, które odnoszą się do ludzkiego zdrowia i bezpieczeństwa oraz środowiska.
- Wyrób przeznaczony jest do użycia dla jednego pacjenta podczas pojedynczego zabiegu. Resterylizacja, powtórne użycie, odzyskiwanie, modyfikacja mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.
- Wyrób przeznaczony jest do użycia wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny.



Wyrób jednorazowego użytku



Sterylizacja tlenkiem etylenu



Chronić przed wilgocią



Zapoznaj się z instrukcją użycia



Wytwórca



Uwaga, zapoznaj się z załączoną dokumentacją



Nie resterylizować



Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone



Autoryzowany Przedstawiciel na terenie UE